

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ПАЛАТУ ПИЩИ И
СБОРА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ ТПП-1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
тЦД3.531.002 ПС**



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 (в дальнейшем - тележка) предназначена для облегчения подачи пищи для лежачих больных и повышения общей культуры внутрибольничного обслуживания, больных в лечебных учреждениях. Тележку изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2. в соответствии с требованиями ТУ 9451-056-07614107-2009.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Габаритные размеры тележки: - длина - ширина - высота	980 ± 25 мм 680 ± 20 мм 905 ± 20 мм
Габаритные размеры панелей: - длина - ширина - глубина	855 ± 50 мм 555 ± 50 мм 30 ± 10 мм
Масса, не более	32 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	150 ± 1 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с нагрузкой, не более	12 кг
Усилие необходимое для включения тормоза, не более	15 кг
Расстояние между панелями тележки	440 ± 5 мм
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт, этикетка)	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Тележка состоит основания 1, установленного на четыре самоориентирующихся колеса 5 и 6, двух скоб 2, одновременно выполняющих роль ручек двух съемных панелей 3, четырех бамперов 4.

Основание представляет собой сварную конструкцию из круглых труб, установленное на два колеса без тормоза 5 и два колеса с тормозом 6. На основании в рамки 7 устанавливаются панели 3.

4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить её от упаковочного материала (для облегчения снятия защитной плёнки рекомендуется обработать поверхность горячей водой, температурой не более 60°C), удалить антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, промыть горячей водой с моющими средствами и последующей просушкой.

4.3. Проверить комплектность.

4.4. При получении тележки в разобранном виде необходимо произвести сборку согласно рисунка 1.

4.5. Провести санитарную обработку тележки.

4.6. Для затормаживания колёс 6 необходимо нажать ногой панель 8 до соприкосновения её с шиной колеса. Растормаживание колеса производить поворотом педали 8 в исходное положение.

4.7. Перед перемещением тележки растормозить колёса.

4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** эксплуатация тележки с неисправными тормозами.



12. Свидетельство о приемке

Тележка для доставки в палату пищи
и сбора грязной посуды

ТПП-1

Наименование изделия

Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



1 - основание; 2 - скоба; 3 - съемная панель; 4 - бампер; 5 - колесо без тормоза; 6 - колесо с тормозом; 7 - рамка; 8 - педаль тормоза.

Рисунок 1

4.9. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** эксплуатация неисправной тележки, самостоятельный ремонт неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.

4.10. При эксплуатации тележки запрещается препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов во избежание получения травм и увечий.

5. Техническое обслуживание

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных; смазке раз в год подшипников колёс; промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.

5.2. Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, работа тормозов.

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2⁰С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).

6.2. Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды, ТПП-1 подвергнута в АО «ДЗМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9451-056-07614107-2009.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9451-056-07614107-2009.
9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcme@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок производителя

Наименование товара	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ПАЛАТУ ПИЩИ И СБОРА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ ТПП-1	
Серийный номер		Дата производства
Гарантийный срок	12 месяцев	со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		[Stamp area with 'М.П.']
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя		[Stamp area with 'М.П.']
ФИО / Подпись		

www.dzmo.ru

